

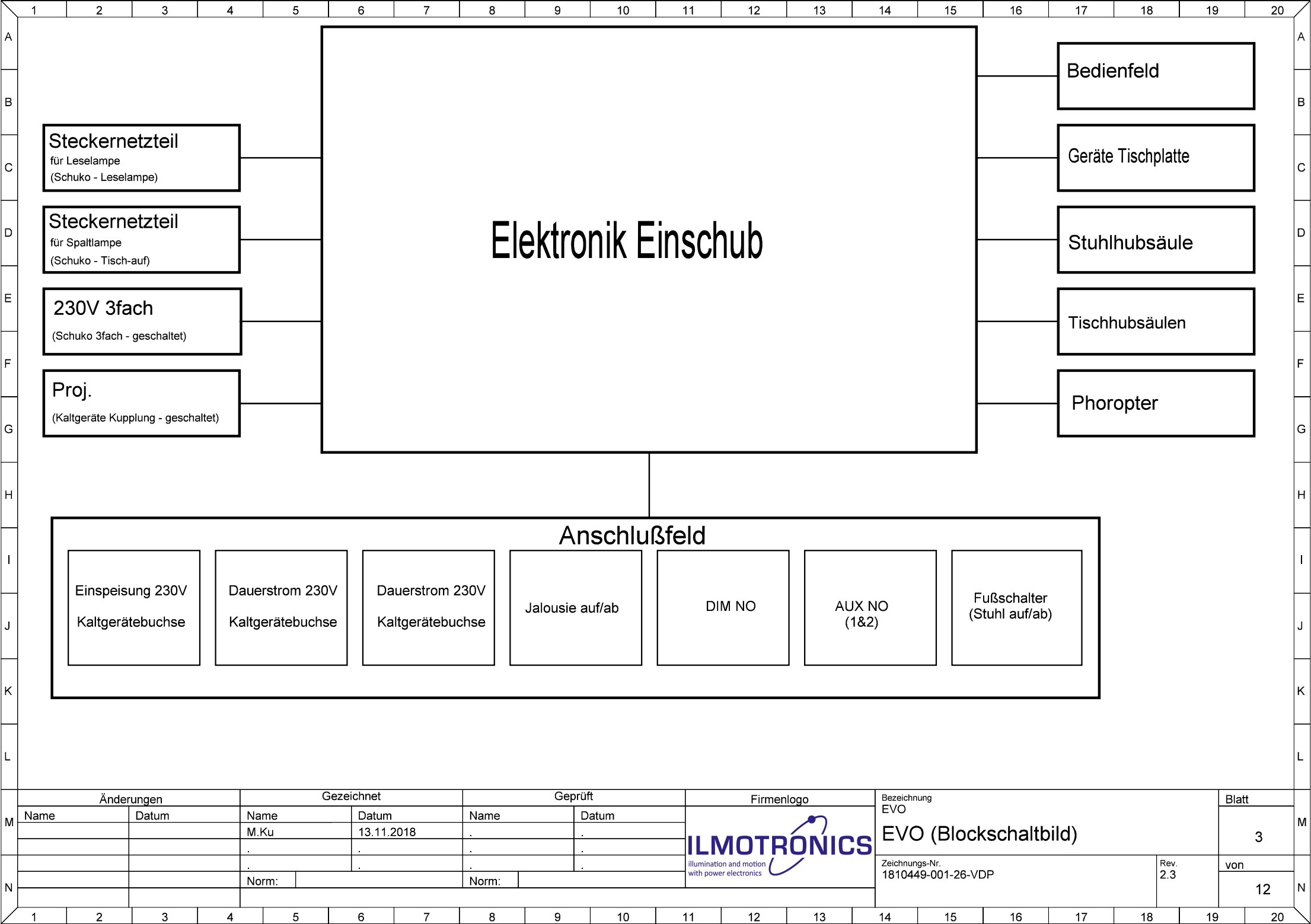



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
A	Projekt: EVO Dokument: Verdrahtungsplan EVO Zchnng.-Nr.: 1810449-001-26-VDP Revision 2.3												Rev.	Änderungsdokumentation			Gezeichnet	Datum		Geprüft	Datum		A		
B													1.0	Erstellt			M.Ku	13.11.2018		R.Kn	03.12.2018		B		
													2.0	"LP Motiva" ersetzt durch" BLP cube-Serie" NT 7,5V, Relais K2 entfallen auf BLP cube-Serie neu: Rel8, AP2, Entr. ,Magnet			M.Ku	21.10.2019		N.Ke	23.10.2019				
													2.1	Kabel für AP2 und Entr. korrigiert; X9 entfallen; XT1-2 für Rel8 neu			M.Ku	19.11.2019		R.Kn	19.11.2019				
													2.2	Blatt-11 AP1 ("bei manueller Tisch") - entfallen Blatt-11 -W62/-W63 "K103" -> "K104" - korrigiert Blatt-11 AP2 "bei Drehtisch" (optional) - ergänzt Blatt-5 -W1 "X3"->"X2" - korrigiert Blatt-5 -W22 (L2 gesch.) zu Klemmleiste X2.2 - neu Blatt-6 -W28 "rt" <-> "sw" - korrigiert Blatt-7 X2 -> X2.1/X2.2 - geändert Blatt 6/7 -W24/-W25 (Aux->"Reserve") - geändert (Standard-Anschluß/optionale Varianten) Blatt-9 AUX -> 4pol - geändert Blatt-7/9 -W51 - ergänzt			M.Ku	16.03.2020		N.Ke	16.03.2020				
D	2.3	Bedienelemente S2-S7 auf BLP-Cube eingezeichnet			M.Ku	02.06.2020		N.Ke	03.06.2020		D														
E																					E				
F																					F				
G																					G				
H																					H				
I																					I				
J																					J				
K																					K				
L																					L				
M	Änderungen				Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo				Bezeichnung EVO						Blatt		M
	Name		Datum		Name		Datum		Name		Datum						Deckblatt						1		
					M.Ku		13.11.2018		.		.														
N					.		.		.		.		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP				Rev. 2.3		von		12	N			
					.		.		.		.														
					Norm:				Norm:																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	Nr.:		Inhalt						Projektseite			Kommentar					Datum Erstellung				A
B	1	Deckblatt						1								13.11.2018				B	
	2	Inhaltsverzeichnis						2								13.11.2018					
	3	Blockschaltbild EVO						3								13.11.2018					
	4	Blockschaltbild EVO Einschub						4								13.11.2018					
	5	Basisleiterplatte cube-Serie						5								13.11.2018					
C	6	Leiterplatte Zwischenlösung						6								13.11.2018				C	
	7	Klemmleiste						7								13.11.2018					
	8	Steckdosen, Netzteile						8								13.11.2018					
D	9	Bedienfeld, Anschlußfeld, Proj.						9								13.11.2018				D	
	10	Hubsäulen						10								13.11.2018					
	11	Geräte-Tischplatte						11								13.11.2018					
	12	Phoropter						12								13.11.2018					
E																				E	
F																				F	
G																				G	
H																				H	
I																				I	
J																				J	
K																				K	
L																				L	
M	Änderungen		Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo		Bezeichnung EVO					Blatt		M	
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum			Inhaltsverzeichnis					2							
			M.Ku	13.11.2018	.	.															
			.	.	.	.															
			.	.	.	.															
N			Norm:	Norm:						Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP					Rev. 2.3	von 12		N			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

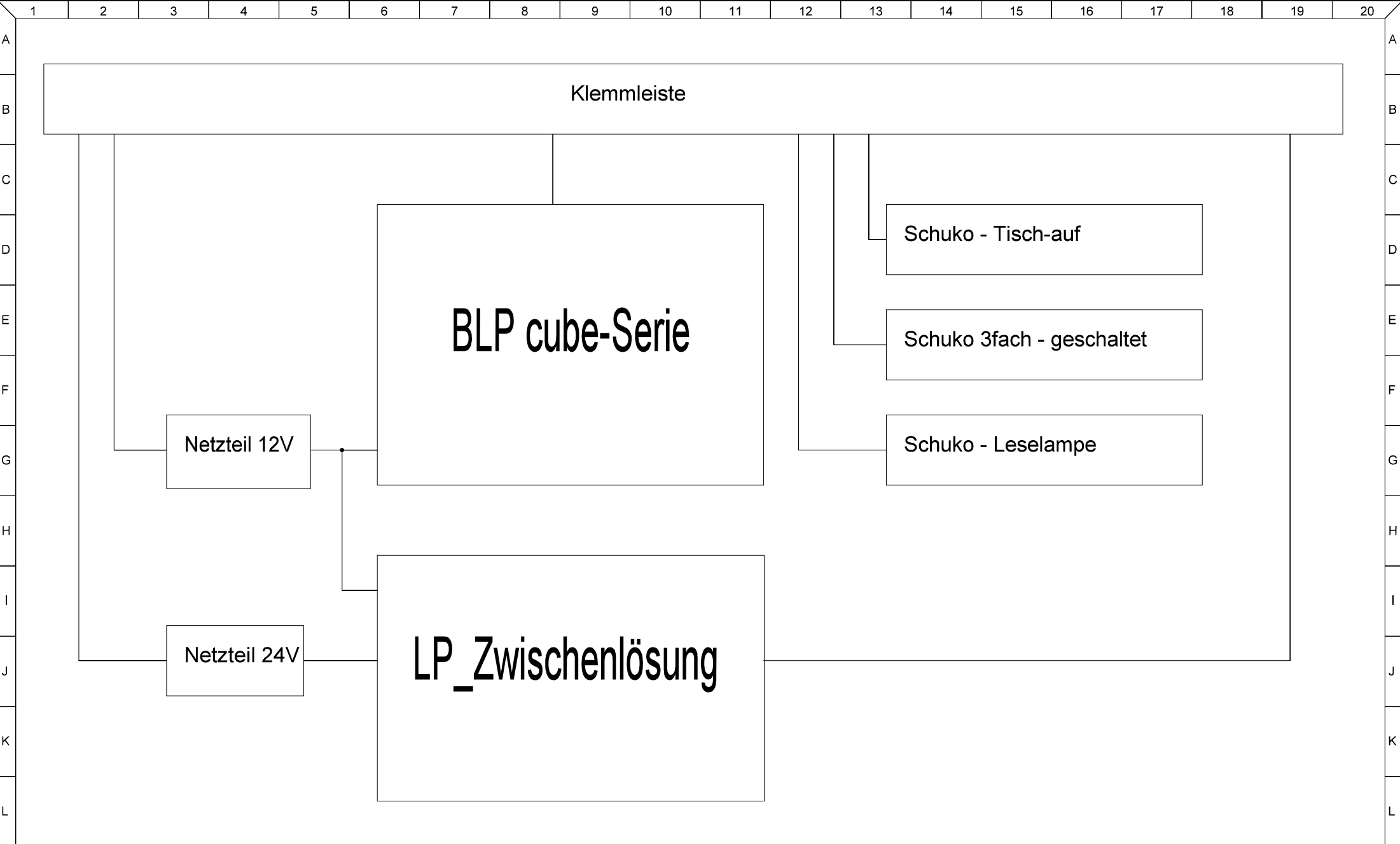


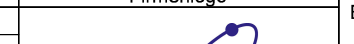



M	Änderungen				Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo  illumination and motion with power electronics				Bezeichnung EVO EVO-Einschub (Blockschaltbild)								Blatt														
	Name		Datum		Name		Datum		Name		Datum														4														
					M.Ku		13.11.2018		.		.																												
					.		.		.		.																												
N					.		.		.		.		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP								Rev. 2.3		von																
					.		.		.		.										12																		
					Norm:				Norm:																														
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	

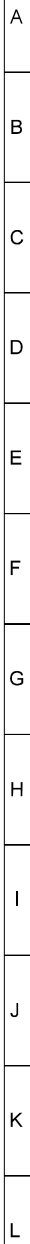


M
N

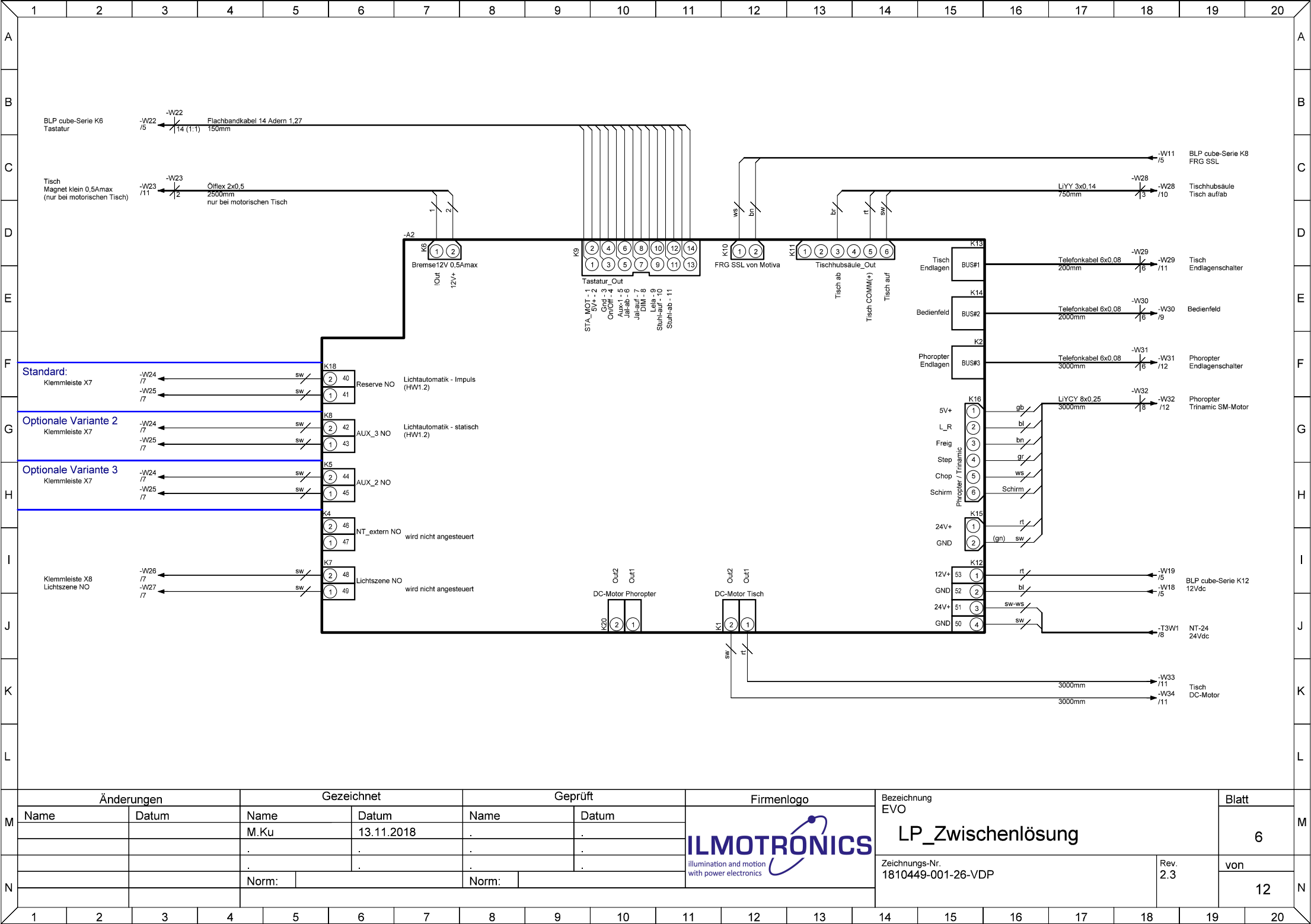


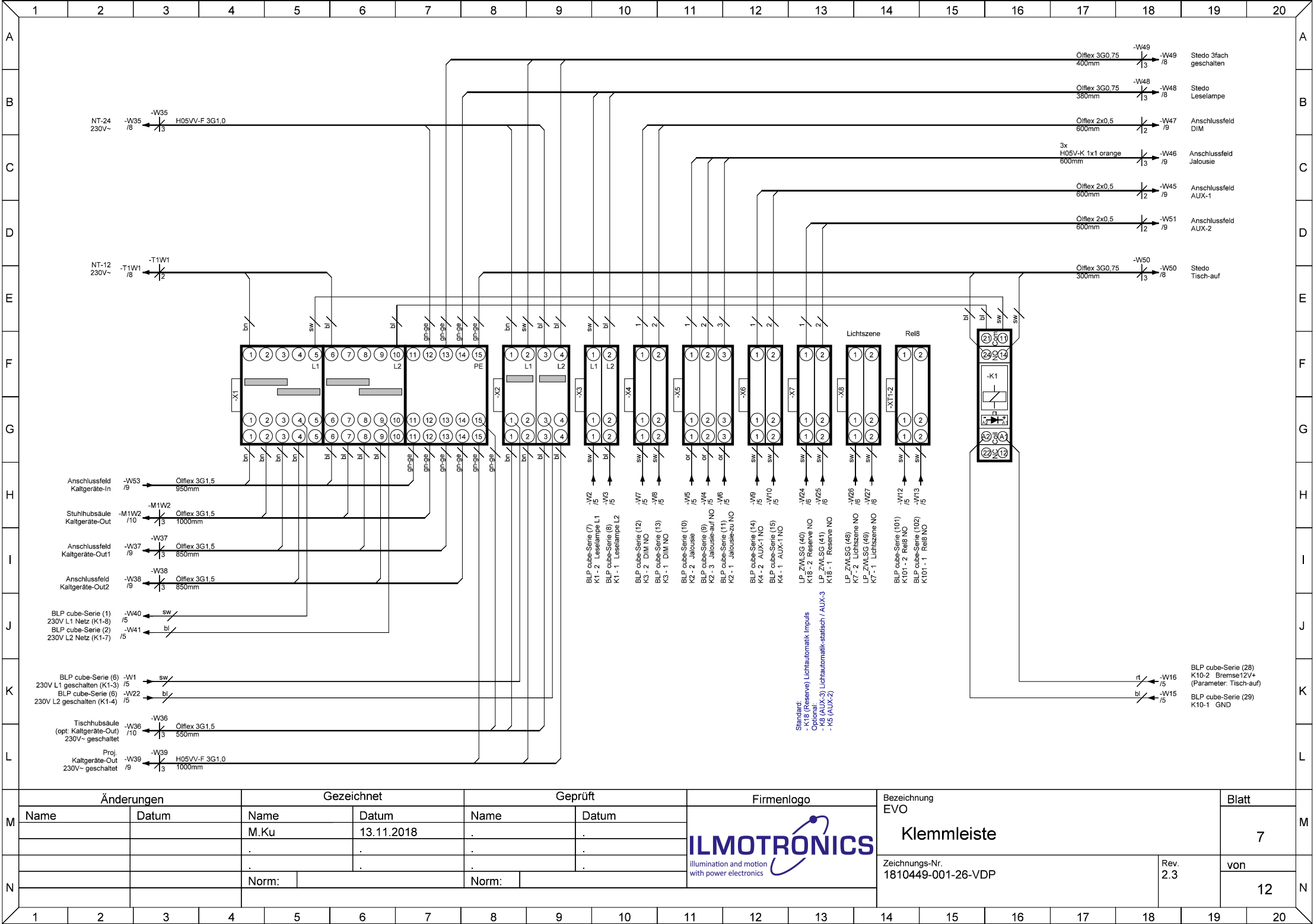

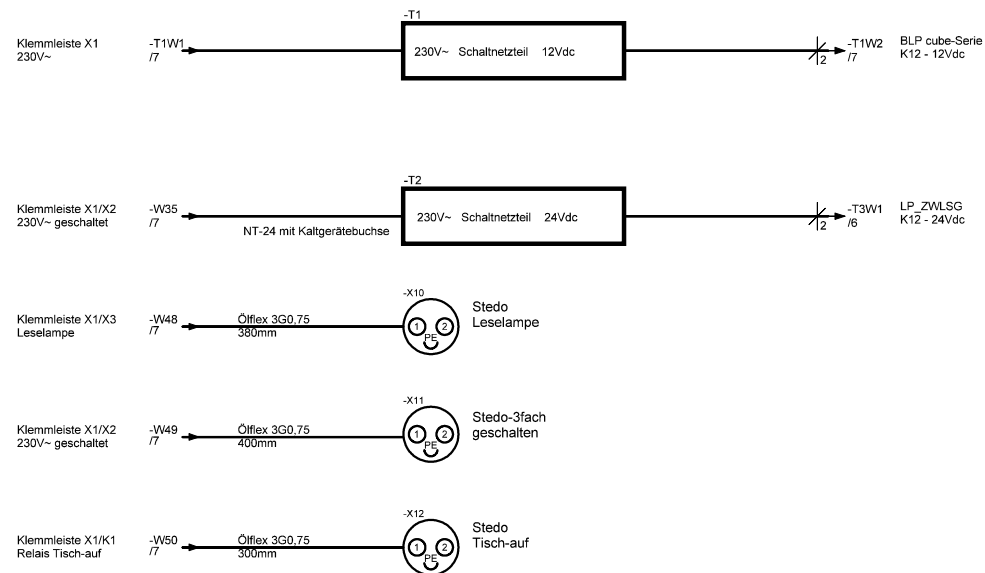


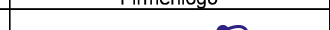M	Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo 	Bezeichnung EVO		Blatt	M
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Steckdosen & Netzteile		8	
			M.Ku	13.11.2018	.	.					
N			.	.	.	.		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP	Rev. 2.3	von	N
			Norm:		Norm:					12	

Bedienfeld

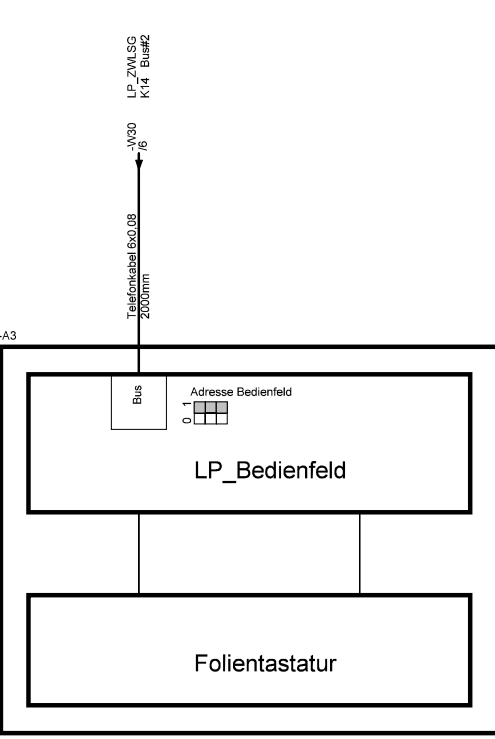

Anschlußfeld

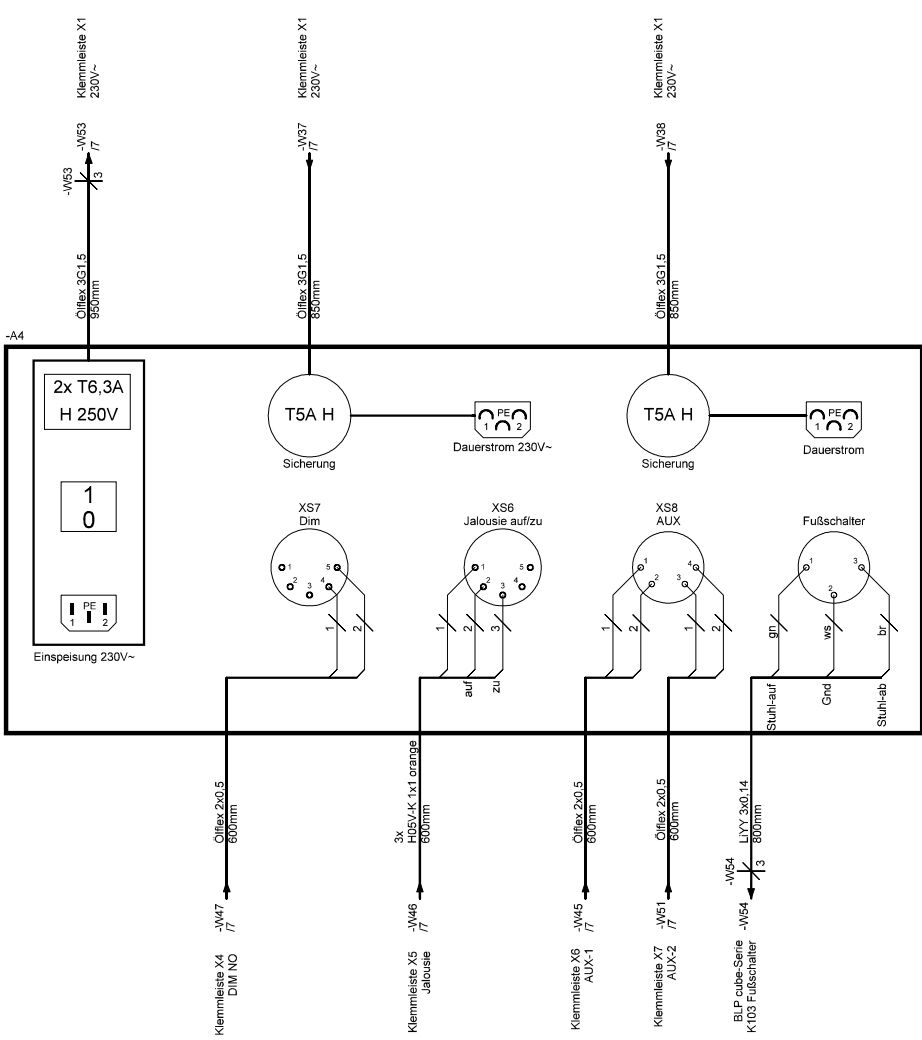


Proj.




Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo	Bezeichnung		Blatt
Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Bedienfeld, Anschlußfeld & Proj.		9
		M.Ku	13.11.2018	.	.				von
		.	.	.	.				12
		Norm:		Norm:		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP		Rev. 2.3	



Stuhlhubssäule

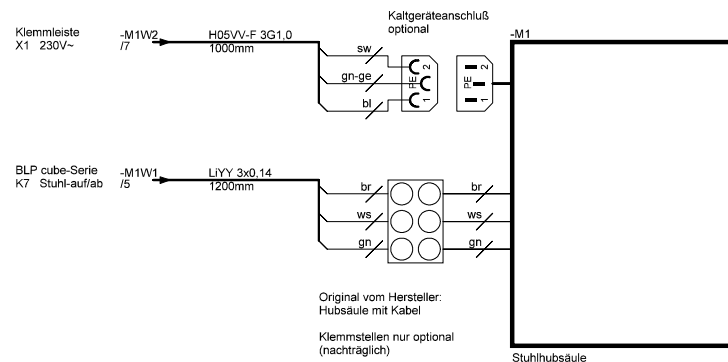

Tischhubssäulen

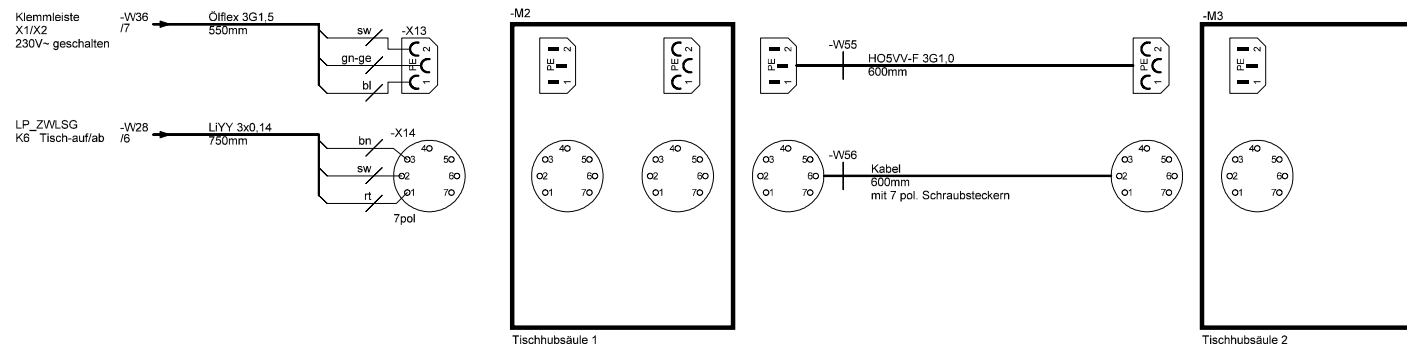

Änderungen

Gezeichnet

Geprüft

Firmenlogo

Bezeichnung
EVO

Blatt

Name

Datum

Name

Datum

Name

Datum

Name

Name

Datum

M.Ku

13.11.2018

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Norm:

Norm:

Norm:

Norm:

Norm:

Norm:

Norm:

Norm:

Norm:

von

von

von

von

von

von

von

von

von

12

12

12

12

12

12

12

12

12

illumination and motion
with power electronics




Hubsäulen

Zeichnungs-Nr.
1810449-001-26-VDP

Rev.
2.3

von

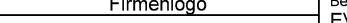Änderungen		Gezeichnet		Geprüft			Bezeichnung EVO		Blatt
Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Geräte-Tischplatte		11
		M.Ku	13.11.2018	.	.				
		.	.	.	.				
		.	.	.	.				
		Norm:		Norm:		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP		Rev. 2.3	von 12

