

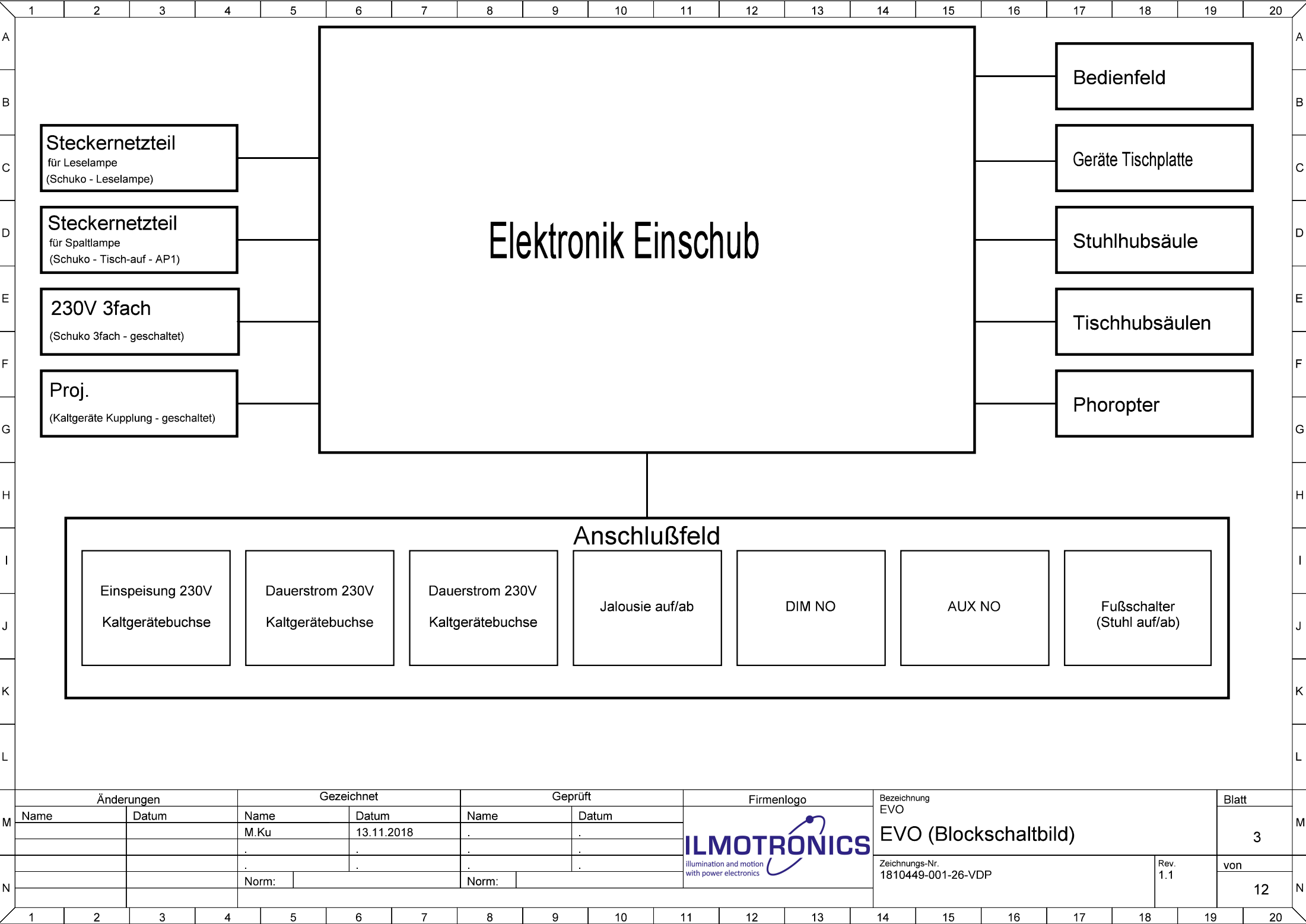



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
A	Projekt: EVO Dokument: Verdrahtungsplan EVO Zchnng.-Nr.: 1810449-001-26-VDP Revision 1.1												Rev.	Änderungsdokumentation			Gezeichnet	Datum		Geprüft	Datum		A		
B													1.0	Erstellt S.3 Text für NT-Leselampe S.6 Text für Relais AUX_3 & Reserve S.7 NT24 von L auf L1			M.Ku	13.11.2018		R.Kn	03.12.2018		B		
C													1.1				M.Ku	14.05.2019		R.Kn	14.05.2019		C		
D																						D			
E																						E			
F																				F					
G																				G					
H																				H					
I																				I					
J																				J					
K																				K					
L																				L					
M	Änderungen				Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo				Bezeichnung EVO						Blatt		M
	Name		Datum		Name		Datum		Name		Datum						Deckblatt						1		
					M.Ku		13.11.2018		.		.														
					.		.		.		.														
N					Norm:				Norm:								Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP						Rev. 1.1		von
																							12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
A	Nr.:		Inhalt						Projektseite			Kommentar					Datum										
	1		Deckblatt						1								13.11.2018				A						
	2		Inhaltsverzeichnis						2								13.11.2018										
B	3		Blockschaltbild EVO						3								13.11.2018										
	4		Blockschaltbild EVO Einschub						4								13.11.2018				B						
	5		Leiterplatte Motiva						5								13.11.2018										
	6		Leiterplatte Zwischenlösung						6								13.11.2018										
	7		Klemmleiste						7								13.11.2018										
C	8		Steckdosen, Netzteile						8								13.11.2018				C						
	9		Bedienfeld, Anschlußfeld, Proj.						9								13.11.2018										
	10		Hubsäulen						10								13.11.2018										
	11		Geräte-Tischplatte						11								13.11.2018										
D	12		Phoropter						12								13.11.2018				D						
E																					E						
F																											
																					F						
G																											
																					G						
H																											
																					H						
I																											
																					I						
J																											
																					J						
K																											
																					K						
L																											
																					L						
M																											
	Änderungen				Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo 			Bezeichnung EVO Inhaltsverzeichnis						Blatt		M			
	Name		Datum		Name		Datum		Name		Datum											2					
					M.Ku		13.11.2018		.		.																
N					.		.		.		.						Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP						Rev. 1.1		von		N
					.		.		.		.														12		
					Norm:								Norm:														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							

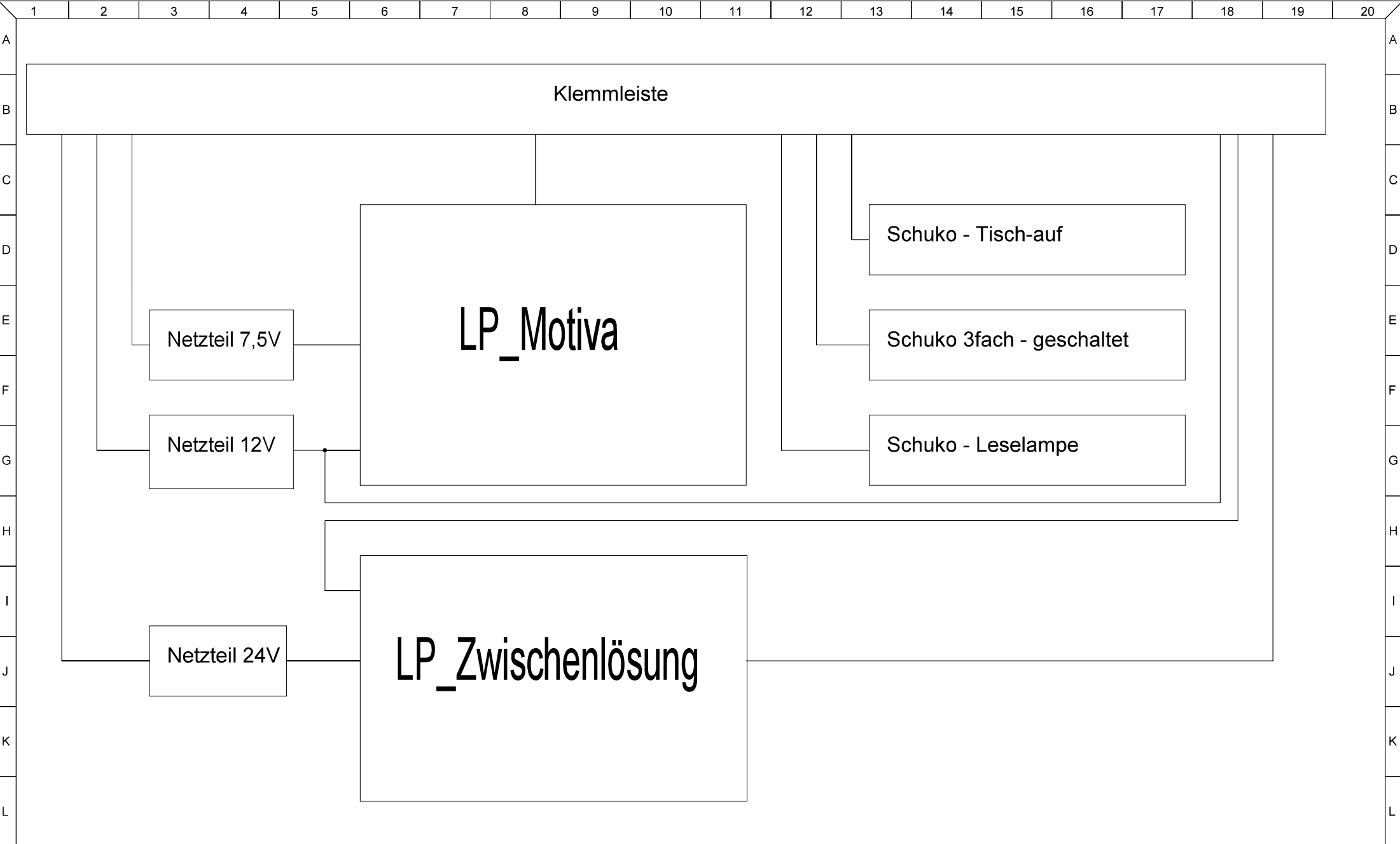

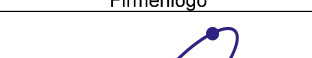


M	Änderungen				Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo 				Bezeichnung EVO EVO-Einschub (Blockschaltbild)								Blatt 4		M																														
	Name		Datum		Name		Datum		Name		Datum																																														
					M.Ku		13.11.2018		.		.																																														
					.		.		.		.																																														
N					.		.		.		.		illumination and motion with power electronics 				Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP								Rev. 1.1		von 12		N																												
					.		.		.		.																																														
					Norm:				Norm:																																																
1																				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	

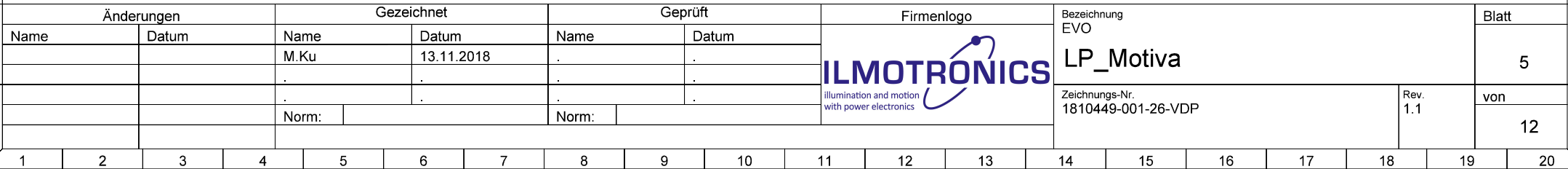

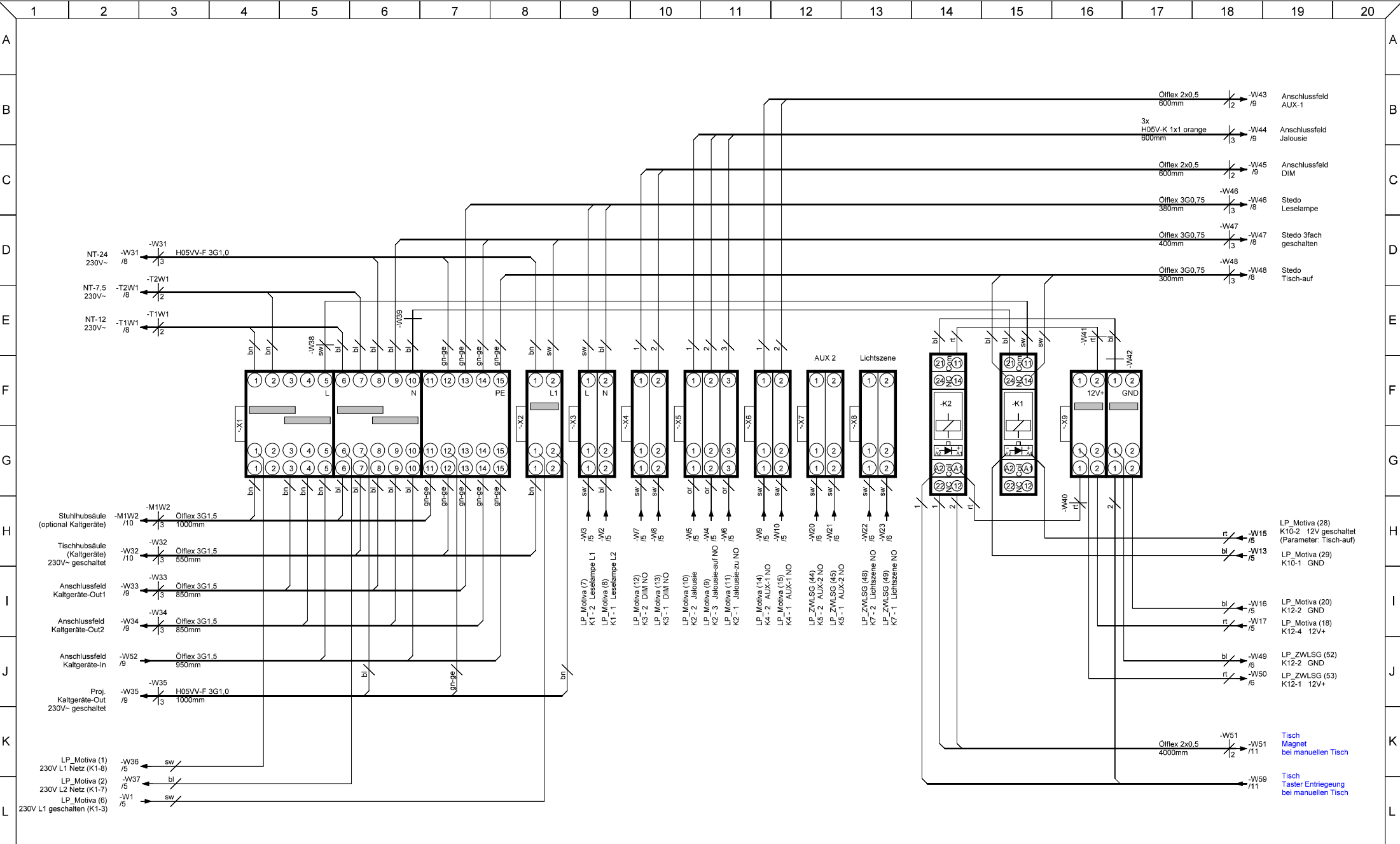


M	Änderungen				Gezeichnet				Geprüft				Firmenlogo 			Bezeichnung							Blatt																
	Name		Datum		Name		Datum		Name		Datum					EVO																							
					M.Ku		13.11.2018		.		.												7																
N					.		.		.		.		illumination and motion with power electronics 			Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP							Rev. 1.1		von														
					Norm:				Norm:																12														
	1		2		3		4		5		6					7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	

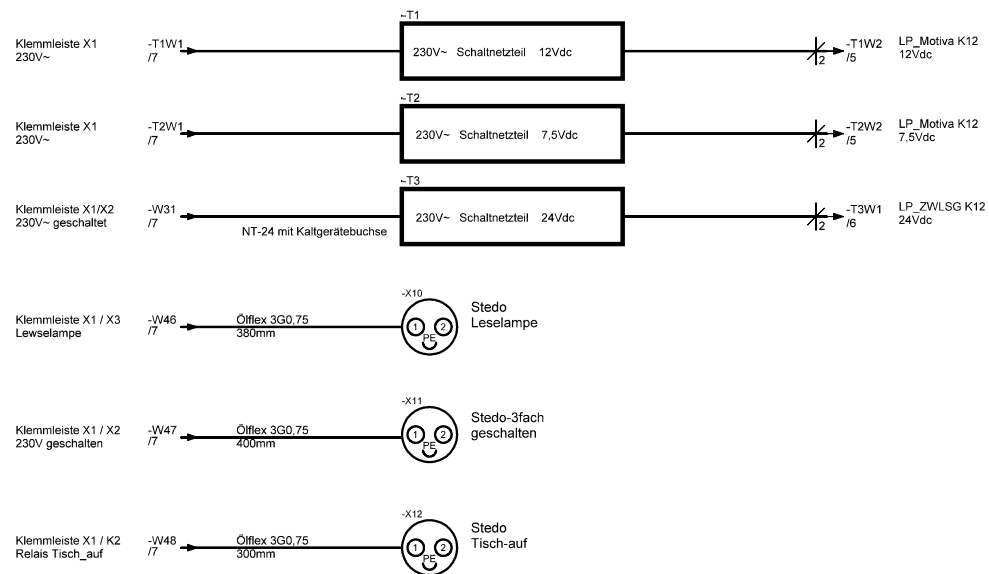


M	Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo 	Bezeichnung EVO		Blatt		M
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Steckdosen & Netzteile		8		
			M. Ku	13.11.2018	.	.						
N			.	.	.	.	illumination and motion with power electronics 	Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP		Rev. 1.1	von	N
			Norm:		Norm:						12	


Bedienfeld

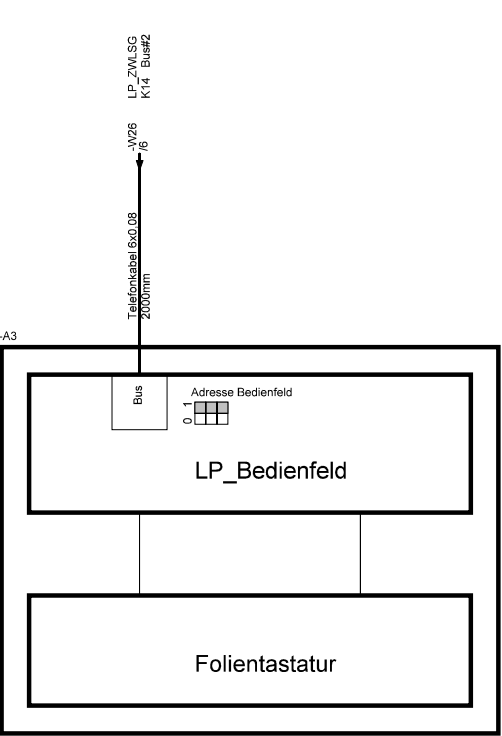

Anschlußfeld

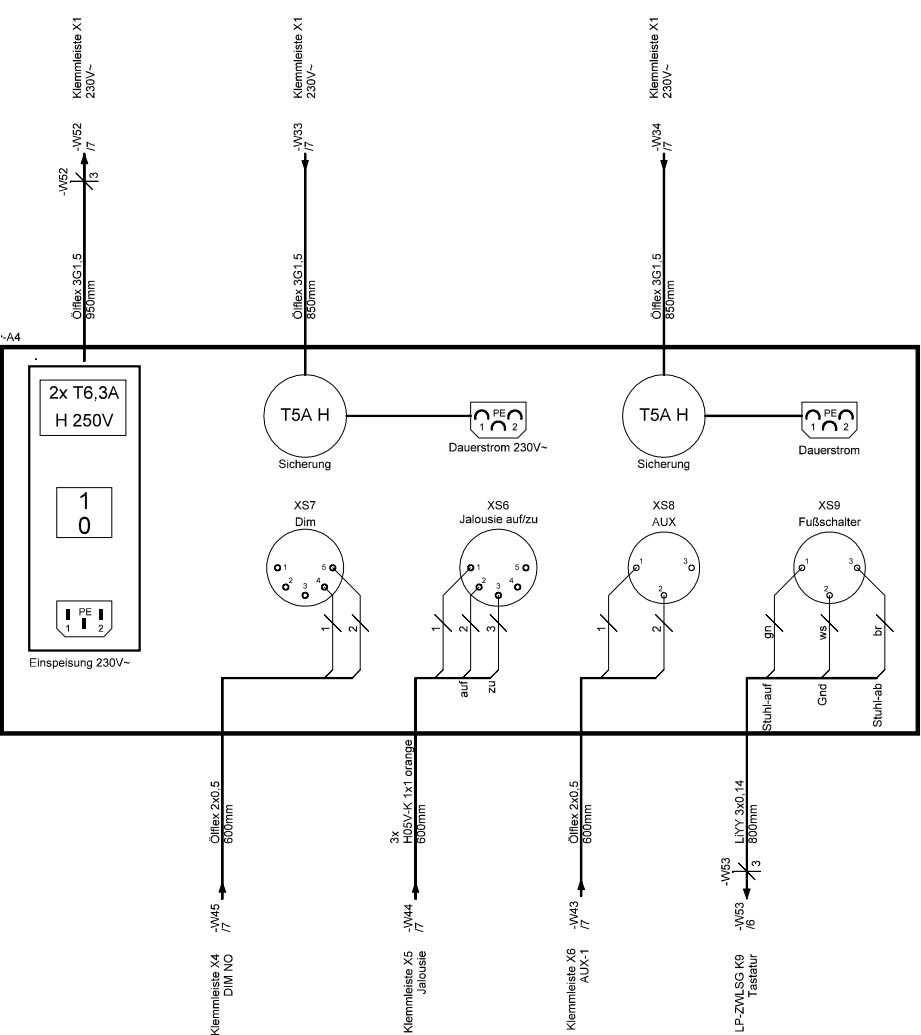


Proj.

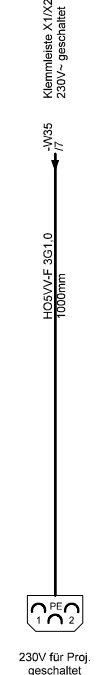


M	Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo  illumination and motion with power electronics	Bezeichnung EVO		Blatt	
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Bedienfeld, Anschlußfeld & Proj.		9	
			M.Ku	13.11.2018	.	.					
			.	.	.	.					
N			.	.	.	.	Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP	Rev. 1.1	von		
			Norm:		Norm:				12		


Stuhlhubsäule

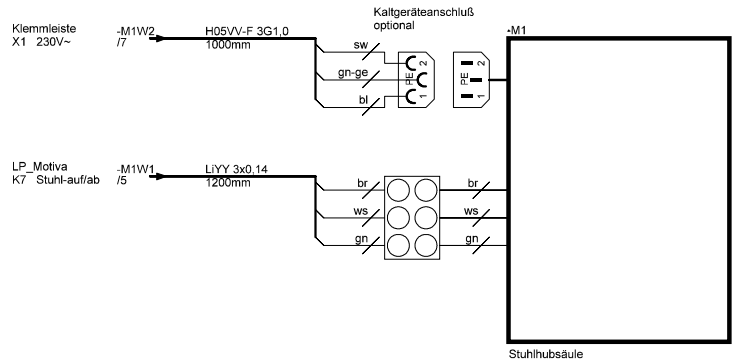

Tischhubsäulen

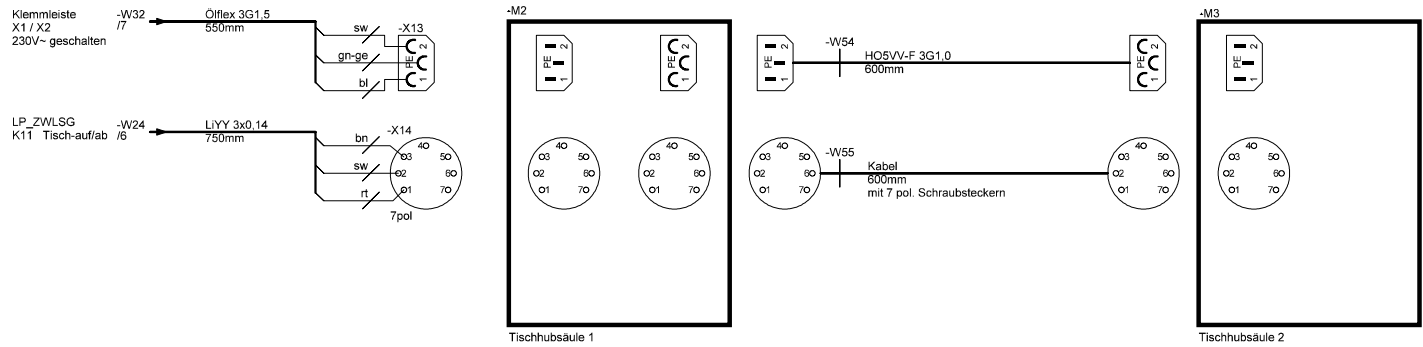





M	Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo	Bezeichnung EVO								Blatt	
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Hubsäulen								10	
N								Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP								von	
								Rev. 1.1								12	

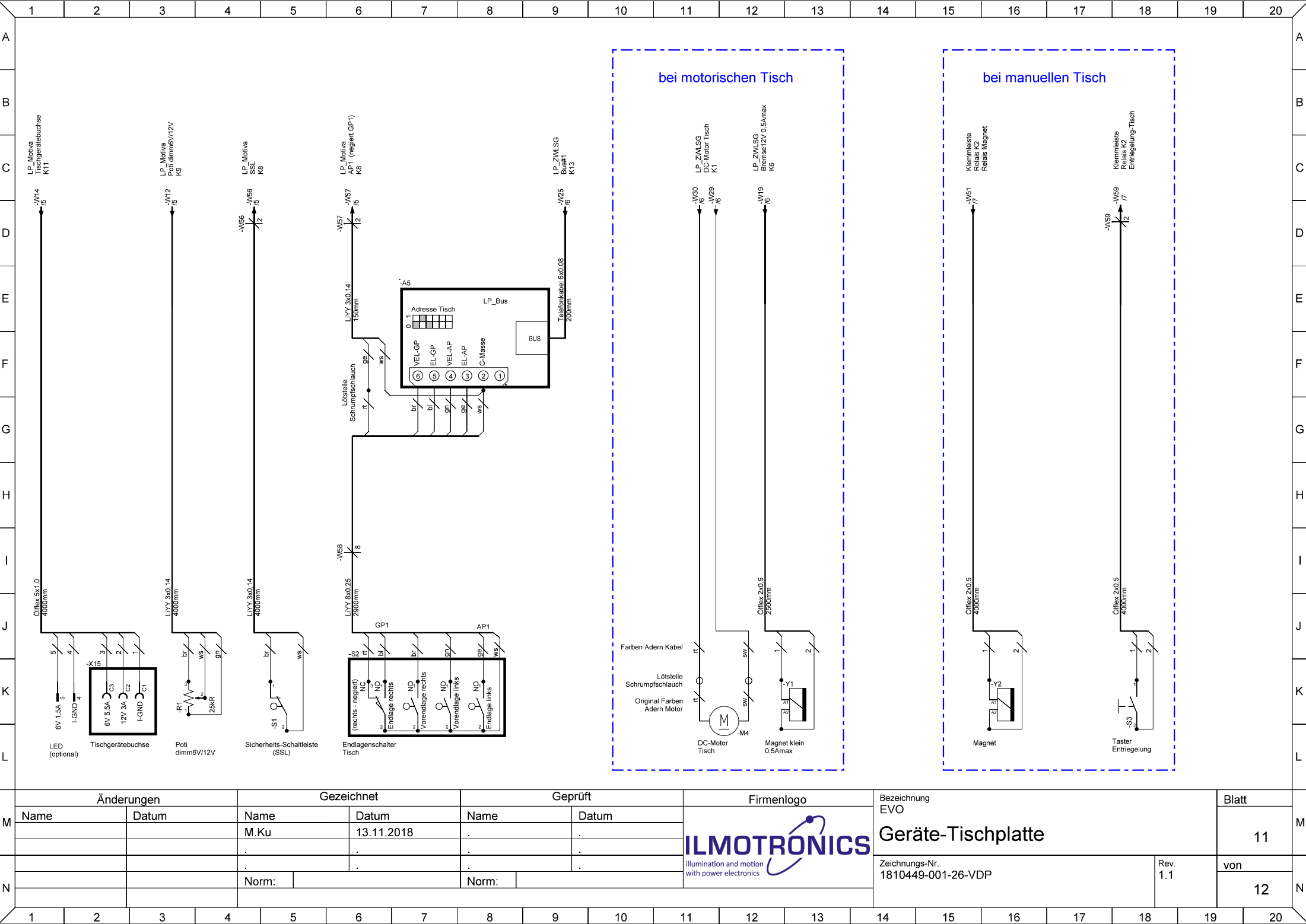

bei motorischen Tisch

bei manuellen Tisch

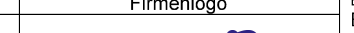M	Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo  illumination and motion with power electronics	Bezeichnung EVO		Blatt	M	
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Geräte-Tischplatte		11		
			M.Ku	13.11.2018	.	.						
N			.	.	.	.		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP		Rev. 1.1	von	N
			.	.	.	.					12	
			Norm:		Norm:							

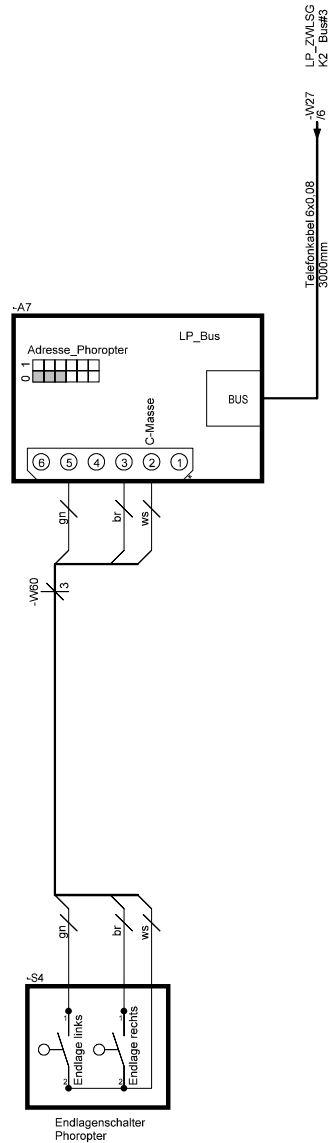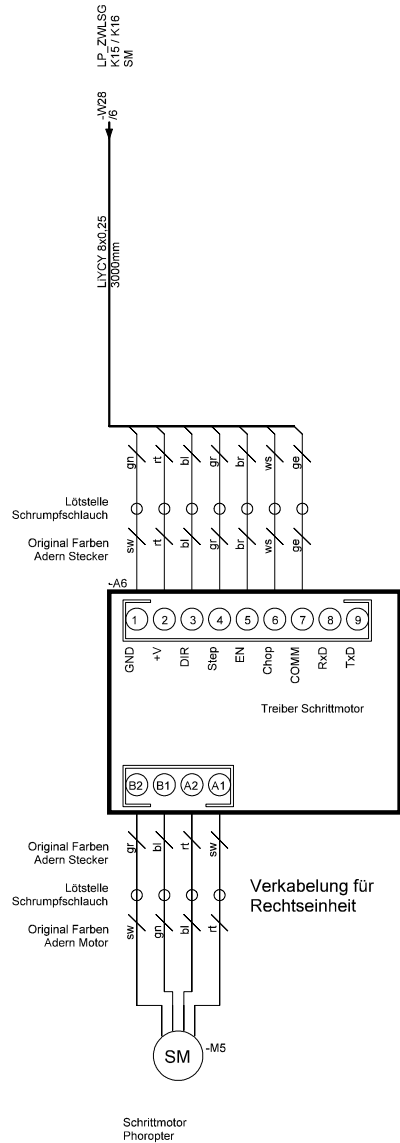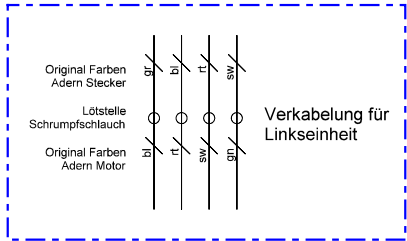

M	Änderungen		Gezeichnet		Geprüft		Firmenlogo	Bezeichnung EVO								Blatt	
	Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum		Phorofter								12	
N			M.Ku	13.11.2018	.	.		Zeichnungs-Nr. 1810449-001-26-VDP								von	
					.	.		Rev. 1.1								12	
			Norm:		Norm:												